

**Le masque facial SEAMLESS est utilisé comme moyen de prévention contre la transmission virale par voie aérienne et par le toucher du visage.**

Le masque facial textile constitue une solution barrière contre la propagation du virus par le toucher du visage et minimise la transmission d'organismes en suspension dans l'air par les personnes se trouvant à proximité, par la toux, la parole, les éternuements ou par voie respiratoire.


Le masque facial est conçu sans soudure et se présente sous forme d'une structure tubulaire d'une seule pièce, ce qui permet d'éliminer l'utilisation de bandes élastiques irritantes autour des oreilles. La conception du produit garantit une utilisation facile et sans risque ainsi qu'un ajustement correct de sorte que le masque reste en place et est particulièrement confortable à porter. Par rapport aux masques à usage unique, le masque Seamless est meilleur pour l'environnement, étant donné qu'il est lavable et réutilisable.

**Caractéristiques :**

- Réduit le risque de contamination virale par voie aérienne en empêchant la contamination par le toucher du visage et la transmission du virus en suspension dans l'air
- Protège l'utilisateur et les personnes se trouvant à proximité
- Facile à porter
- Son ajustement correct garantit un confort élevé et un bon positionnement
- Souple, flexible, sans soudure et tissu respirant
- Peut-être plié en petit format et facilement rangé dans un sac ou une poche
- Lavable et réutilisable – peut être lavé jusqu'à 25 fois
- Texture sans latex pour la sécurité de l'utilisateur
- Ne contient aucune substance toxique conformément à la norme Oeko-Tex 100

**Mode d'emploi**

- Lavez-vous soigneusement les mains avant d'appliquer le masque facial.
- Poser le masque depuis le haut de la tête, la partie la large se trouvant du côté du nez et la partie étroite du côté de la nuque.
- Avec les deux mains, tirez le masque vers le bas autour de la tête et couvrez bien le nez et la bouche.
- Placez le masque facial juste en-dessous des oreilles et autour du cou. Attention à ne pas toucher la bouche, le nez ou les yeux lors de l'application du masque.

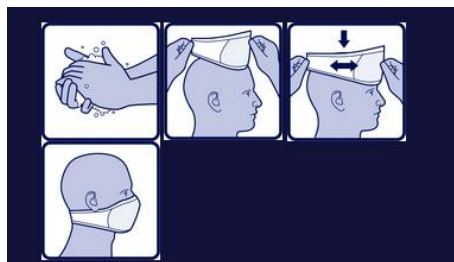

**Retrait**

- Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer le masque.
- Retirez le masque en soulevant la partie étroite couvrant la nuque au-dessus de la tête et retirez ensuite le masque de la bouche et du nez, tout en tenant la partie étroite.
- Attention à ne pas toucher la bouche, le nez ou les yeux lors du retrait du masque.



Le masque facial peut être réutilisé 25 fois maximum après un lavage à 95°C pendant 25 minutes.

**Composition:**

94% Polyamide, 6% Élasthanne

**Instructions de lavage**



**Tailles disponibles :** S/M and M/L

**Couleurs disponibles :** Blanc, noir, beige

**Emballage :** Sachet de 100 pièces

**CE classification :** Class I, Non Stérile

**Stockage:** Garder au sec à la température ambiante et ne pas exposer direct au soleil

**Durée de vie:** 5 ans à dater de la date de fabrication



**DISTRIBUTOR**  
**AVISTER-MEDICAL™**  
Rue de Bruxelles 41  
4800 VERVIERS

Tel : 087/84.04.26 - Fax : 087/84.04.28  
[info@avister-medical.com](mailto:info@avister-medical.com)